

Wir haben für fast jedes Stoma das richtige
Werkzeug



Der richtige Arretier Bolzen hält die
Basisplatte im Zentrum.



Hersteller:

MED. Hilfsmittel-Klaus Riedel GmbH
Am Bahnhof 1a
02708 Dürrehennersdorf

Beratung & Vertrieb:

Med4Aid
Medizinische Produkte & Beratung Onkologien

Falter Straße 54
04329 Leipzig
Telefon: 0341 520575-94
Fax : 0341 590575-95
E-Mail: info@med4aid.com

Endlich etwas Neues

Stomabasisplatte zuschneiden
schnell, einfach und genau



12cm x 12cm x 15cm und 850g leicht - klein aber fein


MED. Hilfsmittel-Klaus Riedel GmbH
www.stoma-versorgungshilfe.com | info@stoma-versorgungshilfe.com

So geht Basisplatten zuschneiden jetzt

Stoma ausmessen und Maß auf eine Schablone übertragen



Schablone ausschneiden

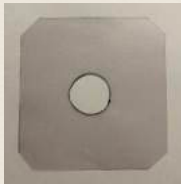

Maß der Schablone auf die Basisplatte übertragen



Übertragene Markierung mit einer Schere ausschneiden



So geht Basisplatten zuschneiden

BESSER

Basisplatte auf die Schneidvorrichtung auflegen



Durch drehen der Spindel im Uhrzeigersinn wird die Basisplatte zugeschnitten



Fertig!

Auf der Rückseite, unser Sortiment.